

# RINOSOL

**2ACT** **1 LIBERA IL NASO**  
**2 EFFETTO BARRIERA**  
**CONTRO VIRUS E BATTERI**



CE  
DISPOSITIVO  
MEDICO

## SPRAY NASALE USO FREQUENTE

Rinosol 2ACT è un Dispositivo Medico innovativo che unisce un'efficace azione decongestionante ad un'azione protettiva della mucosa nasale. È indicato nei casi di congestione e irritazione della mucosa nasale, come nelle sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti, sia acute che croniche.

Il prodotto non contiene decongestionanti vasocostrittori e, grazie al suo meccanismo d'azione non farmacologico, non crea assuefazione, non secca la mucosa nasale e può essere utilizzato frequentemente durante il giorno anche per periodi prolungati.

Rinosol 2ACT agisce grazie ad un complesso attivo naturale di tannini, resine, polisaccaridi e flavonoidi che interagisce con la mucosa nasale svolgendo una doppia azione:

- **libera il naso. Ha un'azione fluidificante del muco, che ne promuove l'eliminazione.**
- **effetto barriera contro virus e batteri. Grazie alla formazione di un film mucoadesivo ad azione barriera che protegge la mucosa** dal contatto con gli agenti esterni (virus, batteri, fumo, smog, pollini, polvere, etc.) e svolge anche un'azione antinfiammatoria indiretta.

Completano l'efficacia di **Rinosol 2ACT** le proprietà rinfrescanti degli oli essenziali che donano una piacevole sensazione di freschezza. Il rispetto della fisiologia della mucosa nasale è garantito inoltre dal carattere isotonic della formulazione.

### INDICAZIONI

È indicato nei casi di congestione e irritazione della mucosa nasale, come nelle sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti, sia acute che croniche. È adatto per adulti e bambini a partire da 8 anni di età. Ideale per un uso frequente e per periodi prolungati. Può essere utilizzato anche in gravidanza e allattamento.

### COMPOSIZIONE

**Sostanze funzionali:** complesso attivo naturale composto da frazione tanninica da Amamelide foglie, frazione polisaccaridica da Aloe Vera gel fogliare\*, frazione resinosa da Mirra resina, frazione flavonoidica da The verde foglie\*. Oli essenziali di Eucalipto e Niaouly.

**Contiene inoltre:** acqua, gomma xanthan, glicerina vegetale, poligliceril-6 caprilato, oligliceril-3 cocoato, poligliceril-4 caprato, poligliceril-6 ricinoleato, tocoferolo, olio di girasole, potassio sorbato, alcool benzilico. **\*Ingrediente da Agricoltura Biologica**

# RINOSOL

**2ACT** 1 LIBERA IL NASO  
2 EFFETTO BARRIERA  
CONTRO VIRUS E BATTERI

## MODO D'USO

**Per un'efficace azione decongestionante e protettiva utilizzare Rinosol 2ACT come di seguito indicato:**


Applicare 1 o 2 erogazioni per narice e soffiare il naso delicatamente, quindi ripetere l'applicazione.

Per favorire una distribuzione omogenea del prodotto è utile massaggiare lievemente il naso dall'esterno con movimenti longitudinali dal basso verso l'alto.


Si consiglia di applicare **Rinosol 2ACT** più volte durante la giornata anche a distanza ravvicinata e di ripetere l'erogazione prima di coricarsi.

*Al primo utilizzo, per eliminare l'aria dall'erogatore, premere più volte fuori dalle narici. Agitare il flacone prima dell'uso.*


### 1 - SPRUZZARE

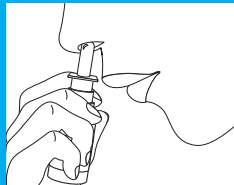

### 2 - SOFFIARE

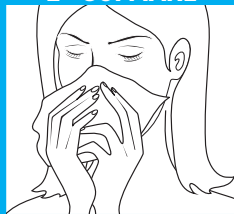

### 3 - RISPRUZZARE

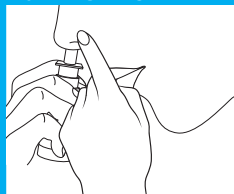

## AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Se i sintomi persistono consultare il medico. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

## CONFEZIONE

Flacone in vetro da 15 ml con nebulizzatore spray.

## SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si consiglia di usare il prodotto entro 2 mesi dall'apertura.

## DATA ULTIMA REVISIONE: Rev.4 06/2022

Rinosol 2ACT è un Dispositivo Medico classificato e prodotto in ottemperanza alle prescrizioni della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.



**COSWELL S.P.A.**

via Gobetti 4 - 40050 - Funo di Argelato (BO) - ITALY

[www.coswell.biz](http://www.coswell.biz)



[www.rinosol.it](http://www.rinosol.it)

REF: BRINDPSPX  
94031882