

Scheda Prodotto

RINOSOL 2ACT



CE
DISPOSITIVO
MEDICO

E' un Dispositivo Medico **CE**

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

coswell

Copyright © Coswell S.p.A.
P.IVA 00708541206



Via P. Gobetti n.4 – 40050 Funo di Argelato (BO)

Codice fiscale e n. d'iscrizione del Registro delle
Imprese di Bologna: 02827560729

Partita Iva: 00708541206

Numero R.E.A.: BO – 336611

Capitale sociale: € 27.867.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di Direzione e
coordinamento di Fingual S.r.l.

Rinosol 2Act è un prodotto che agisce attraverso un meccanismo di azione meccanico, non farmacologico.

È indicato nei casi di **congestione e irritazione della mucosa nasale**, come nelle **sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti**, sia acute che croniche.

Rinosol 2ACT agisce grazie ad un complesso attivo naturale di tannini, resine, polisaccaridi e flavonoidi che interagisce con la mucosa nasale svolgendo una doppia azione:

- Libera il naso. Ha un'azione fluidificante del muco, che ne promuove l'eliminazione.
- Effetto barriera contro virus e batteri. Grazie alla formazione di un film mucoadesivo ad azione barriera che protegge la mucosa dal contatto con gli agenti esterni (virus, batteri, fumo, smog, pollini, polvere, etc..) e svolge anche un'azione antinfiammatoria indiretta.

Completano l'azione di Rinosol 2Act le proprietà rinfrescanti degli oli essenziali che donano una piacevole sensazione di freschezza.

Il rispetto della fisiologia della mucosa è consentito inoltre dal carattere isotonico della formulazione. La barriera creata dal suo complesso vegetale protegge la mucosa e ne permette la normalizzazione. Non contiene vasocostrittori e non secca la mucosa nasale.

Rinosol 2Act è adatto ad essere usato anche in gravidanza e in allattamento e nel bambino oltre gli 8 anni di età.

Rinosol 2Act può essere utilizzato numerose volte nell'arco della giornata e anche per periodi di tempo prolungati contribuendo ad alleviare il fastidio creato dalla congestione nasale.

COMPOSIZIONE

Sostanze funzionali


Complesso attivo naturale composto da frazione tanninica da Amamelide foglie, frazione polisaccaridica da Aloe Vera gel fogliare*, frazione resinosa da Mirra resina, frazione flavonoidica da The verde foglie*. Oli essenziali di Eucalipto e Niaouly.

Contiene inoltre: acqua, gomma xanthan, glicerina vegetale, poligliceril-6 caprilato, poligliceril-3 cocoato, poligliceril-4 caprato, poligliceril-6 ricinoleato, tocoferolo, olio di girasole, potassio sorbato, alcool benzilico.


* *Ingrediente da Agricoltura Biologica*

MODO D'USO


1 - SPRUZZARE

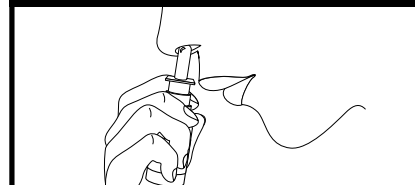

2 - SOFFIARE

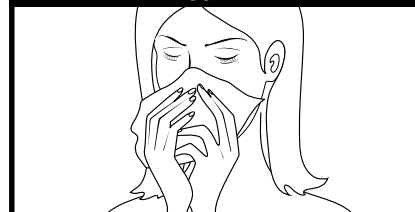

3 - RISPRUZZARE

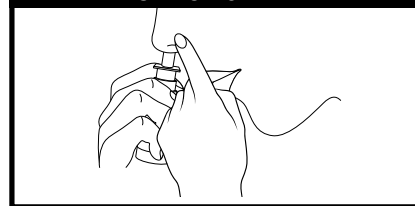

Applicare 1 o 2 erogazioni per narice e soffiare il naso delicatamente quindi ripetere l'applicazione. Per favorire una distribuzione omogenea del prodotto è utile massaggiare lievemente il naso dall'esterno con movimenti longitudinali dal basso verso l'alto. Si consiglia di applicare Rinosol 2Act più volte durante la giornata anche a distanza ravvicinata e di ripetere l'erogazione prima di coricarsi, anche utilizzandolo in associazione con cerottini nasali.

Al primo utilizzo, per eliminare l'aria dall'erogatore, premere più volte fuori dalle narici. Agitare il flacone prima dell'uso.

Si consiglia di usare il prodotto entro 2 mesi dall'apertura.

AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Se i sintomi persistono consultare il medico. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

CONFEZIONE

Flacone in vetro da 15 ml con nebulizzatore spray.